


BALFOUR Bauchdeckenhalter (18.764.18/.20/.25)

1. Die Schmetterlingsmutter der mittleren Valve lösen.

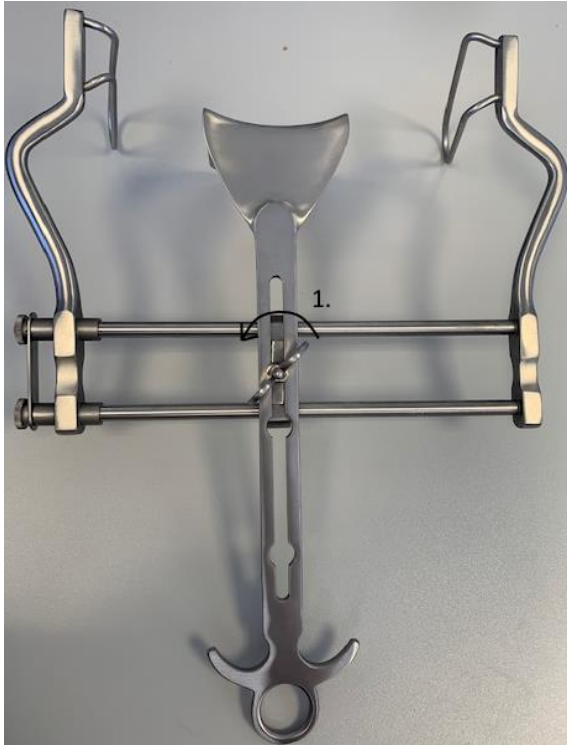

2. Die mittlere Valve aus ihrer Halterung nehmen.



3. Die beiden Rändelmuttern lösen



4. Die unterstützende Metallplatte vom Instrument abziehen.



5. Die Valve (auf der Seite der Rändelmutter) vom Instrument abziehen.

6. Die Halterung der mittleren Valve vom Instrument abziehen.



7. Das Instrument ist demontiert.

