

FINOCH. BURFORD Sperrer (56.236.21)

1. Die Sicherung der Valven lösen, indem diese in Pfeilrichtung geschoben wird.




2. Die Valven aus ihren Halterungen nehmen.



3. Die Sicherung ohne Valven wieder schließen, um diese aus den Halterungen nehmen zu können.



4. Um den beweglichen Arm des Instruments zu entfernen, den Handgriff gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ist der Arm entfernt, lässt sich der Handgriff aus seiner Position nehmen.

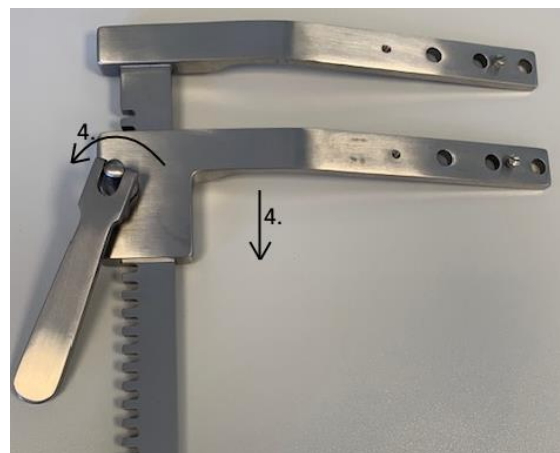

5. Das Instrument ist demontiert.

